

COME DISINFETTARE LA MASCHERINA

"Pocket MASK (Laerdal)"

per la respirazione bocca -maschera

NOTA BENE:

- **la maschera deve essere utilizzata solo da personale addestrato in modo specifico (ADDETTI AL PRONTO SOCCORSO).**
- **NON FARE** prove su persone: **utilizzare esclusivamente il manichino.**

La maschera è riutilizzabile e facile da pulire.

La valvola unidirezionale può essere pulita e riutilizzata solo per ripetere le prove sul manichino, ma deve essere scartata dopo essere stata utilizzata con un paziente (infortunato).

Anche il filtro deve essere sostituito.

(I filtri sono a disposizione, dietro richiesta scritta, presso la Divisione Igiene e Sicurezza)

Cosa serve:

- **acqua tiepida e sapone**
- **soluzione di Sodio ipoclorito (candeggina) e acqua 1:64 (una parte di candeggina e 64 parti di acqua)**

Come fare:

1. **Togliere il filtro;**
2. **Lavare la mascherina con acqua e sapone, sciacquare in acqua pulita;**
3. **Immergere nella soluzione di *Sodio ipoclorito* 1:64 per 10 minuti**
4. **Risciacquare e lasciare asciugare;**
5. **Reinstallare il filtro (verificare che sia ben fissato);**
6. **Riporre nella custodia.**

Non sottoporre a pastorizzazione, bollitura o autoclavaggio.